

LUBRIX *Spray*

KIRURGILISTE
INSTRUMENTIDE LIBESTI,
PARAFIINÕLI BAASIL

SURGICAL INSTRUMENTS



■ TOOTE EELISED

- Kirurgiliste instrumentide liigendite manuaalseks libestamiseks
- Töödeldud pindade briljantne sära
- Lihtne ja täpne instrumentide hooldus on garanteeritud



KIRURGILISTE INSTRUMENTIDE LIBESTI, PARAFIINÕLI BAASIL

■ KASUTUSJUHE

■ Esimesel kasutamisel:

- Pane kätte kindad ja kasuta silmade kaitset
- Paigalda pihusti pudeli külge

■ Kasutusjuhend:

- 1- Loksuta pudelit enne kasutamist
- 2- Pudelit vertikaalselt hoides pihusta õli instrumentide liigenditele
- 3- Liiguta liigendeid paar korda, et aine korralikult laiali läheks
- 4- Pühi jäädgid kuiva paberiga ära

■ HOIATUSED

Vaata ohutuskaarti (SDS 010328)

■ FÜÜSIKALISED OMADUSED

- Olek: Vedelik
- Värvus: **Värvitu**
- pH: **6.5**
- Kasutusaeg pärast avamist: **2 aastat**

■ KOOSTIS

- Puhas parafiinõli
- Emulgaator
- Aerosooli tekitaja: lämmastik

■ PAKEND

- ① Kastis 4 pudelit 400mlref. **1032856**

Turustaja: Semetron AS, Veerenni 51, Tallinn



Hazardous product - Follow precautions of use. Always read label and product information before use.